



CimoCid Sensitive



Alkoholische Händedesinfektion • mit Rückfetter

Einsatzbereich

Zur Hygienischen Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

Anwendungsanleitung

CIMOCID SENSITIVE in die gereinigten und trockenen Hände einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten.

Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Hygienische Händedesinfektion bakterizid und levurozid	konz. 30 Sek.	VAH, EN 1500
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 hohe und niedrige Belastung
Begrenzt viruzid	konz. 15 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung
Noroviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Besonders hautverträglich und rückfettend
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet
- HACCP-konform

Anwendungshinweise

Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Sonstige Hinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Technische Informationen

Karton mit 35 Kittelfl. à 150 ml Art.-Nr. 00628
Karton mit 10 Eurofl. à 500 ml Art.-Nr. 00629
Karton mit 10 V10 Fl. à 500 ml Art.-Nr. 00630
Karton mit 12 Eurofl. à 1.000 ml Art.-Nr. 00631
Karton mit 6 V10 Fl. à 1.000 ml Art.-Nr. 00632
Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20592

Zubehör

Spender manuell EURO für 1.000ml Art.-Nr. 80054
Spender touchless EURO für 1.000ml Art.-Nr. 80007
Dispenser für EURO 500 ml/1.000ml Art.-Nr. 88019

Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g Propan-2-ol und 2,9 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008
(CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-79068

CHZN6645

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0324

pH conc 0 2 4 8 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Tanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL